



## Testdurchführung

1. Öffne den Verpackungsbeutel und entnehme den Teststreifen und die Tüte mit dem Trocknungsmittel
2. Vergewissere Dich, dass der Teststreifen unversehrt ist und dass die Statusanzeige auf dem Trocknungsmittel gelb ist.
3. Wasche oder desinfiziere gründlich die Hände.
4. Nimm den Abstrichtupfer aus der Verpackung. Berühre den Tupfer nur am Griff und nicht an der Spitze mit dem Wattebausch.
5. Neige den Kopf leicht nach hinten.
6. Führe den Tupfer mit dem Wattebausch vorsichtig und langsam in das linke Nasenloch ein. Schiebe vorsichtig und langsam den Tupfer etwa 2 cm vorwärts, bis Du einen Widerstand spürst. Übe dabei keinen Druck aus.
7. Drehe den Tupfer 4-mal (insgesamt etwa 15 sec lang) gegen die Naseninnenseite und entnehme ihn dann aus der Nase.

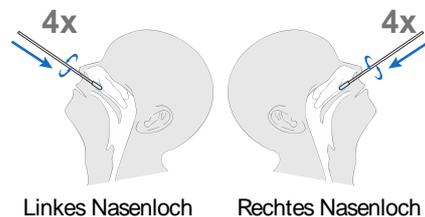


8. Wiederhole den Schritt 6 und 7 mit dem rechten Nasenloch. Verwende dabei denselben Tupfer.
9. Stelle den Abstrichtupfer in das R6hrchen mit Extraktionspuffer. Drücke das R6hrchen im unteren Bereich zusammen und drehe den Tupfer 15-mal hin und her. Drücke die Seite des R6hrchens weiterhin zusammen, w6hrend Du den Tupfer entnimmst, um die gesamte Fl6ssigkeit aus dem Tupfer zu pressen.
10. VerschlieÙe das R6hrchen mit der Spenderkappe.

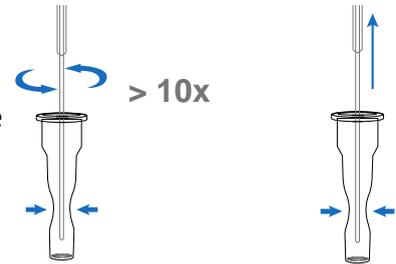

### **Test durchf6hren**

11. Lege den Teststreifen auf eine ebene Fl6che.
12. Halte das R6hrchen senkrecht 6ber das runde markierte Feld.
13. Tropfe genau 4 Tropfen auf das runde Feld. Dr6cke daf6r, falls n6tig das R6hrchen leicht zusammen.

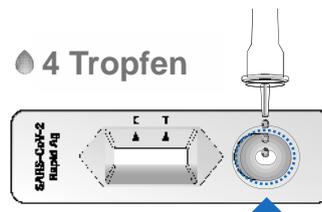

Hinweis: Test geht auch mit 5 Tropfen


14. Stelle eine Stoppuhr und lies das Testergebnis nach 20 min ab.

### Interpretation der Ergebnisse


- Wenn eine Linie (egal wie schwach) bei C ist und keine bei T ist → negatives Testergebnis; eher unwahrscheinlich, dass Du COVID-19 hast.



- Wenn eine Linie bei T und keine bei C ist → ungültiger Test

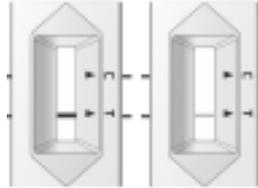

- Wenn bei C und T jeweils eine Linie ist → positives Testergebnis; sehr wahrscheinlich, dass Du an COVID-19 erkrankt bist

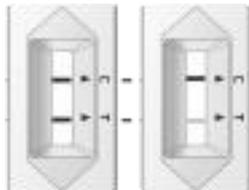

15. Melde Dein Ergebnis deiner Lehrerin oder deinem Lehrer.

16. Entsorge das gesamte Testmaterial im dafür vorgesehenen Behälter.